


下記の ①、②、③ にしたがって針を取り外してください。

針ケースを必ず使用してください。



ペン本体は左手

針ケースは右手

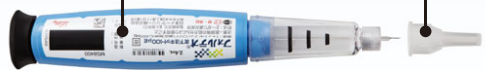

① 針ケースは奥までまっすぐ押しこむ



② 針ケースを手前に5~6回程度回す



③ 針ケースの太い部分を持ってまっすぐ抜く



針が外れない場合は再度、①、②、③を繰り返してください。

※取り外しをされる際は、主治医の指示に従い、針で指などをささないようご注意ください。

一般の方・患者様向け フォルテオ® 電話相談窓口

フリーダイヤル
0120-52-10-52
通話料は無料です。携帯電話、PHSからご利用いただけます。

通常電話番号
078-242-3649
フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号におかけください。なお通話料はお客様負担となります。

相談受付窓口対応時間
7:00~22:00

製造販売元(資料請求先)

日本イーライリリー株式会社
〒651-0086 神戸市中央区磯上通7丁目1番5号