


フォルテオ®皮下注キット600μgをご使用になる前に

内袋からの取り出し方

フォルテオ®キットを透明の内袋から取り出すときには、**黒い注入ボタンの側から内袋を破り**、**青い本体を持って**取り出してください。内袋から取り出す際、**黒い注入ボタンを引っ張らない**ようご注意ください。


1 黒い注入ボタン側から内袋を破ります。

2 青い本体を持って取り出します。

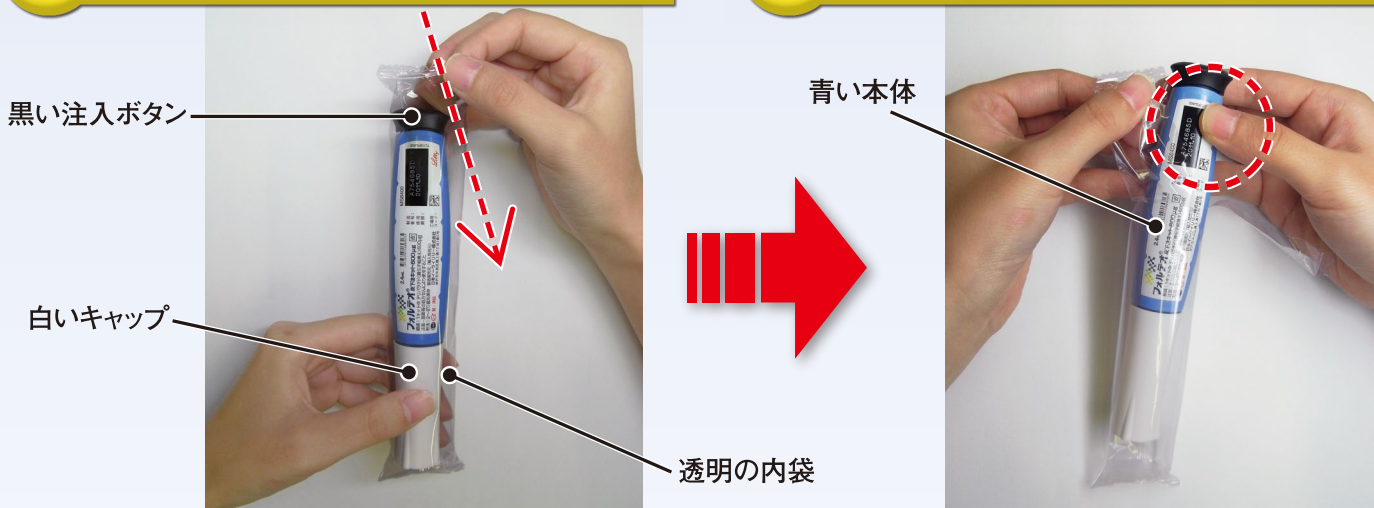

? 【内袋から取り出すときに黒い注入ボタンを引き出してしまったら】

注入ボタンを押し戻そうとしないで以下の操作を行ってください。注入ボタンが引き出されても、以下の手順(下記図参照)で空打ちすることで問題なくお使いいただけます。

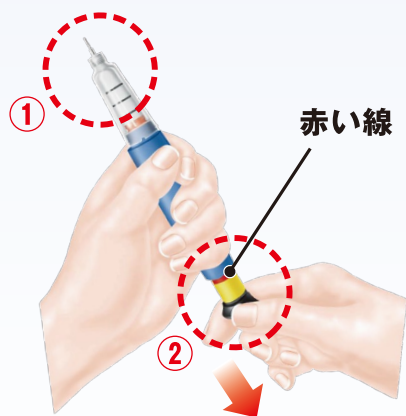

① 白いキャップを取り外してカートリッジ先端をアルコール綿で消毒後、**注射針を取り付け**ます。

② 黒い注入ボタンを**赤い線が見えるまで**引っ張ります。

③ **空打ち**を行います。これで注射ができる状態になります。

? 【上の操作で注射針を取り付ける前に黒い注入ボタンを押し込んでしまったら】

上記と同様に①②③の方法で空打ちを行うことで、注射ができる状態になります。

一般の方・患者様向け フォルテオ®電話相談窓口

フリーダイヤル

0120-52-10-52

※(コッ) と ※(コッ)
通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

通常電話番号

078-242-3649

フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号におかけください。なお通話料はお客様負担となります。

相談受付窓口対応時間

7:00~22:00



ペンのことやお薬のこと、
困ったらお電話ください。