

# 日本イーライリリーのインスリン製剤を ご使用の患者さんへ

単位設定  
編

投与量の設定は、必ず「単位表示窓」で確認しましょう。



投与量を設定する際は、**単位表示窓の内側**に示された数字を確認して設定してください。

●主治医から26単位注射するよう指示された場合

「単位表示窓」で  
単位数の確認を!



**誤** 外側の数字(6)は  
設定単位数では  
ありません。

**正** 示された数字(26)が  
設定した単位数です。

※インスリン グラルギン BS注カート・ミリオペン®[リリー]は日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社と販売提携をしています。

日本イーライリリー製品に関するお問い合わせ先

**Lilly Answers** リリーアンサーズ 日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口

一般の方・患者様向け

**0120-245-970**\*1 **078-242-3499**\*2

\*1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからご利用いただけます。

\*2 フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号におかけください。尚、通話料はお客様負担となります。

\*3 祝祭日及び当社休日を除きます。

[www.lillyanswers.jp](http://www.lillyanswers.jp)

最新の製品情報や製品についてよくある質問を  
こちらからお問い合わせいただけます。

〈当社製品に関するお問合せ〉

●受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30 \*3

〈当社注入器に関するお問合せ〉

●受付時間 月曜日～土曜日 8:45～22:00

●上記時間外は音声ガイダンスにて対応しています