

フォルテオ®皮下注キット 600 μ g の使い方よくあるご質問『注射後の針の取り外し方』について

取扱説明書の方法でも針が取り外せない場合、以下の方法を試してください。

1

針ケースを
奥まで押し込んで
取り付ける



2

利き手にペンを持ち、
もう一方の手で針ケースを
固定し、ペンを左に回す



3

3~5回ペンを回した後
針ケースの太い部分を持ち
まっすぐ抜く



*取り外しをされる際は、針で指を刺さないようにご注意ください。

一般の方・患者様向け フォルテオ® 電話相談窓口

フリーダイヤル

0120-52-10-52

通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

通常電話番号

078-242-3649

フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号におかけください。なお通話料はお客様負担となります。

相談受付窓口対応時間

7:00~22:00

製造販売元(資料請求先)

日本イーライリリー株式会社

〒651-0086 神戸市中央区磯上通7丁目1番5号

2013.3 FRT-N016(R0)